



Tensiomètre à bras

Mesure de la pression sanguine




Modèle : PM-3

Manuel d'utilisation




Structure du produit :

Corps

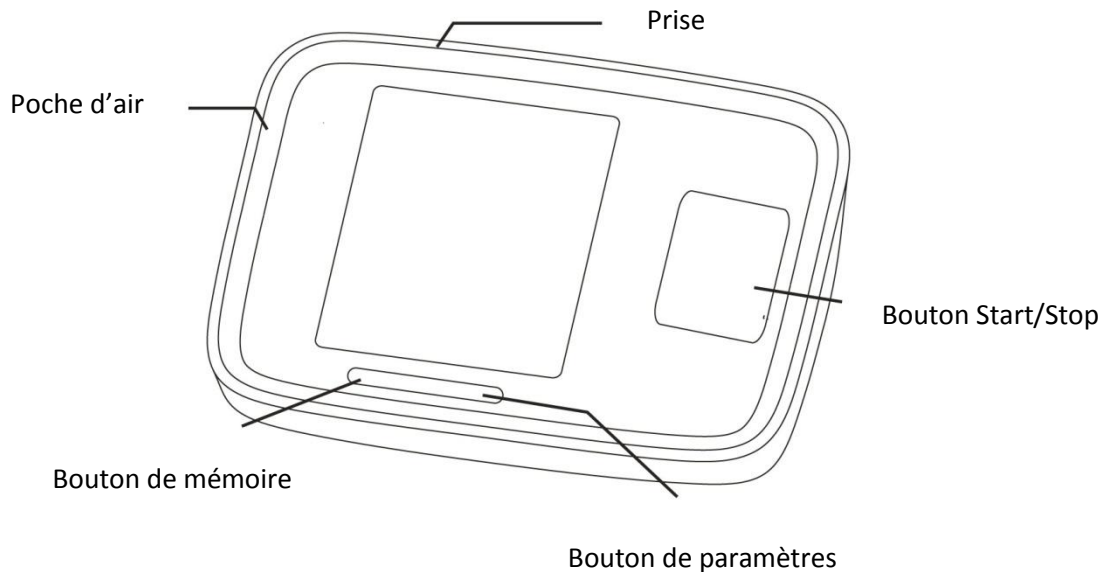


Affichage

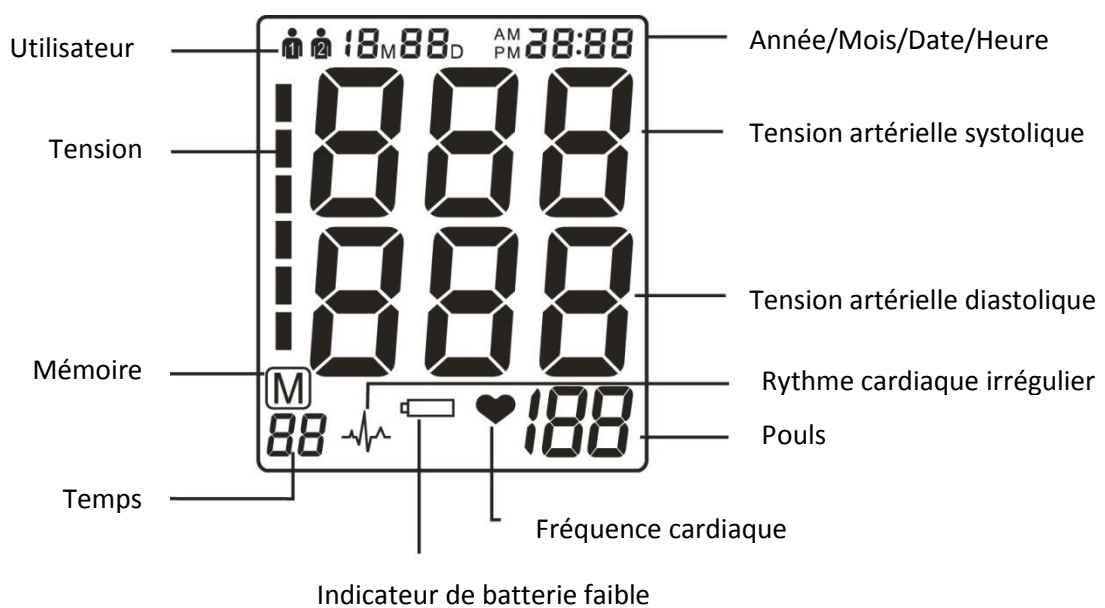

Taille du brassard et connexion :

Le brassard est une taille M, ce qui convient pour les avant-bras d'une taille comprise entre 22 et 32 cm.

Insérez le câble avec le tube du brassard dans l'entrée se trouvant sur le côté gauche de l'appareil (voir image). Seul le brassard fourni avec cet appareil peut être utilisé.

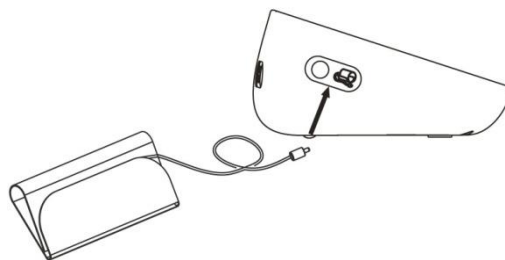

Installation de la batterie

Retirez le couvercle du compartiment de la batterie et insérez les 4 piles AA. Assurez-vous que chaque pile soit bien orientée.

Mode de réglage :

Comment régler l'appareil ?

1. Par utilisateur :

Appuyez sur le bouton « SET » lorsque l'appareil est éteint, l'écran affichera : IMAGE BONHOMME 1 ET 2, appuyez ensuite sur le bouton MEM, cela vous permettra de changer de personne entre la n°1 et la n°2. Appuyez ensuite sur SET pour confirmer l'utilisateur. Vous allez ensuite rentrer dans le réglage par année.

2. Par année :

L'écran affichera 20XX, les deux derniers numéros avanceront de 1 en 1 lorsque vous appuierez sur le bouton MEM. Quand vous avez rentré la bonne date, appuyez sur SET pour confirmer.

3. Mois et date

Ensuite l'écran affichera : xxMxxD et XXXX. Le curseur sera d'abord positionner pour choisir le mois, appuyez sur MEM pour avancer de 1 en 1. Pressez SET pour valider. Le bouton se placera ensuite sur Date. Effectuez la même opération jusqu'à arriver au bon jour puis pressez SET pour valider.

Une fois fait, vous allez pouvoir régler l'heure en effectuant les mêmes manipulations.

Mesure


Utilisation de l'appareil :

Différentes méthodes de mesures :

Après la avoir ajusté le brassard à votre bras, la mesure de la pression artérielle peut commencer.

Appuyez sur le bouton « START/STOP ». Tous les boutons vont apparaître sur l'écran. Après deux secondes, vous allez entendre 2 signales sonore retentir. La pompe commence à agir sur le brassard, puis la pression du brassard sera indiquée à l'écran.

- 1) Après avoir atteint la pression suffisante, la pompe maintiendra cette pression, puis la diminuera progressivement. La pression du brassard sera affichée. Dans le cas où le pouls ne serait pas assez fort, l'appareil exercera à une pression plus élevée.
- 2) Lorsque l'appareil émet un signal, le symbole ♥ commence à clignoter. De plus, l'utilisateur entendra un signal sonore après chaque battement de cœur (après avoir détecté les pulsations).
- 3) A la fin de la mesure de votre tension, vous entendrez un signal sonore plus long. Les tensions diastoliques et systoliques sont maintenant affichées à l'écran.
- 4) Les valeurs mesurées restent affichées jusqu'à la mise hors tension de l'appareil. Si aucun bouton n'est pressé durant les 3 minutes qui suivent, l'appareil s'éteint automatiquement pour économiser la batterie.

Remarque : Lorsque l'appareil détecte une fréquence cardiaque irrégulière pendant la mesure, le symbole  s'affichera.